

Pele bem tratada

Tratamento com Microdermoabrasão utilizando Dermovac Chronos System e Ponteiros de Diamante ajudam na busca por rosto sem mancha e cicatriz

O Dermovac Chronos System consiste em uma moderna técnica de esfoliação mecânica progressiva e controlada, que se utiliza de um circuito de vácuo (loop fechado) para promover a pulverização de microcristais de óxido de alumínio sobre a epiderme, podendo promover 3 níveis diferentes de abrasão: superficial, intermediário ou profundo.

O Dermovac Chronos System, **com a utilização do peeling de cristal e com o peeling de diamante**, é indicado para o tratamento de diversas desordens cutâneas, como:

- Rejuvenescimento (prevenção e tratamento),
- Hiperqueratoses, redução de linhas finas de expressão,
- Rugas finas e médias, cicatrizes inestéticas causadas pela acne,
- Traumas ou cirurgias, estrias, desordens pigmentares,
- Poros dilatados, microcomedões, irregularidades cutâneas,
- Peles seborreicas, rinofima, foliculite,
- Pré-tratamento de laser e peelings químicos, pré-cirúrgico estético,
- Preparo para aplicação de princípios ativos e como complemento de cirurgias estéticas e tratamento de laser.

A esfoliação promovida pela microdermoabrasão mecânica, **seja pelo peeling de cristal ou pelo de diamante**, provoca uma estimulação da renovação da pele devido à retirada das camadas

da córnea, contribuindo na eliminação das linhas cutâneas superficiais, estimulando a regeneração celular, incrementando a produção de colágeno e melhorando a qualidade da pele.

A técnica não oferece riscos, não tem efeitos colaterais, é indolor, dispensa o uso de anestesia e não interfere na rotina normal.



Microdermoabrasão é ideal para:

- Pessoas que não têm tempo para ficar fora do trabalho ou socialmente (como nos 7 - 10 dias após procedimentos com laser)
- Pessoas ativas que não querem interromper sua vida social nem atividades esportivas.
- Pessoas jovens com poucas e precoces mudanças na pele que desejam uma melhora na aparência

Compressas especiais e aplicação de emolientes ajudam a acelerar a recuperação da pele, sendo que a cicatrização total geralmente ocorre em até 10 dias, e os pacientes são instruídos a usar protetor solar diariamente e evitar exposição desnecessária ao sol direta ou indiretamente por 3 a 6 meses. O número de sessões é de 8 a 20, dependendo da indicação e os intervalos entre as sessões variam de 7 a 30 dias dependendo do nível da esfoliação.

Consultoria:

Flávia Maria Pirola

Fisioterapeuta Especialista em Dermato-Funcional, responsável pelo Suporte Técnico da BIOSET Indústria de Tecnologia Eletrônica

Carolina Magon

Fisioterapeuta Especialista em Dermato - Funcional e Suporte Técnico da BIOSET

O DERMOVAC CHRONOS e DERMOVAC possibilita ainda a aplicação do PEELING DE DIAMANTE, pois dispõe da opção do acoplamento.



DERMOVAC - Vacuoterapia



Conjunto de PONTEIRAS DE DIAMANTE

Para maiores informações ligue para Bioset (19) 3534-3693 ramal 246 ou envie e-mail para suporte@bioset.com.br ou suporte2@bioset.com.br